

Starkey Hearing Technologies Mini Turbo Charger



Wie funktioniert?

Der Mini Turbo Charger ist ein Ladegerät im Taschenformat für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Hörsysteme in Ric R und BTE Bauform. Das Ladegerät funktioniert sowohl, wenn es an den Strom angeschlossen ist als auch unterwegs. Es besitzt einen integrierten Akku, der ein Paar Hörsysteme bis zu viermal auflädt.

- 1 Stellen Sie die Hörsysteme mit dem Lautsprecher nach außen in den Mini Turbo Charger.
- 2 Die Hörsysteme schalten sich automatisch aus und beginnen zu laden.
- 3 Die beiden Seiten-entsprechenden LEDs leuchten 10 Sekunden lang und erlöschen anschließend, um die Akkulebensdauer des Mini Turbo Chargers zu verlängern.
 - A Grün blinkend = ladend
 - B Grün durchgehend = vollständig geladen
 - C Rot blinkend = Fehler beim Laden
 - D Alle vier LED blinkend abwechselnd = Turbo Modus
- 4 Die Hörsysteme sind innerhalb von drei Stunden vollständig aufgeladen



Turbo Modus

Der Turbo Modus schaltet sich automatisch ein, wenn die Akkulaufzeit der Hörsysteme oder des Ladegeräts nahezu erschöpft ist.

- Alle vier LED blinken abwechselnd während der Turbo Modus aktiv ist.
- Der Turbo Modus bleibt aktiv, bis eine Ladung von 20% in den Hörsystemen erreicht ist (maximale Ladezeit bis 20% beträgt 7 Minuten).
- Eine Turboladung der Hörsysteme entspricht einer Betriebsdauer von 3,5 Stunden.
- Eine Turboladung des integrierten Akkus des Mini Turbo Chargers ermöglicht das vollständige Aufladen eines Paares von Hörgeräten.
- Sowohl Hörsysteme und Mini-Turbo Charger können gleichzeitig im Turbo Modus sein, sofern der Mini Turbo Charger am Strom angeschlossen ist.

Nutzung

- Mit dem integrierten Akku können die Hörsysteme aufgeladen werden, während sich der Mini Turbo Charger nicht an einer Stromquelle befindet.
- Es ist sicher, die Hörsysteme im Mini Turbo Charger aufzubewahren wenn sie vollständig aufgeladen sind. Sie können nicht überladen.
- Hörsysteme werden beim Entfernen aus dem Mini Turbo Charger automatisch eingeschaltet und beim Einsetzen in das Ladegerät ausgeschaltet.
- Der Ladestatus der Hörsysteme kann mit einem Doppeltipp auf die Oberseite des Mini Turbo Chargers während des Ladevorgangs überprüft werden.
- Um die volle Kapazität des integrierten Akkus zu erhalten, muss der Mini Turbo Charger alle drei Wochen vollständig aufgeladen werden.
- Der Ladezustand des integrierten Akkus kann durch einen Doppeltipp auf die Oberseite des Ladegeräts überprüft werden. Der Status des integrierten Akkus ist nur verfügbar, wenn sich keine Ladegeräte im Ladegerät befinden.
- LED-Anzeigen für den integrierten Akku:
 - Ⓐ 4 durchgehende LEDs >75%
 - Ⓑ 3 durchgehende LEDs <75%
 - Ⓒ 2 durchgehende LEDs <50%
 - Ⓓ 1 durchgehende LED <25%
 - Ⓔ 1 blinkende LED = niedriger Ladestand, an Stromquelle anschließen, um integrierten Akku aufzuladen
- Bewahren Sie den Mini Turbo Charger während der Nichtbenutzung oder beim Transport in der Hülle auf.